


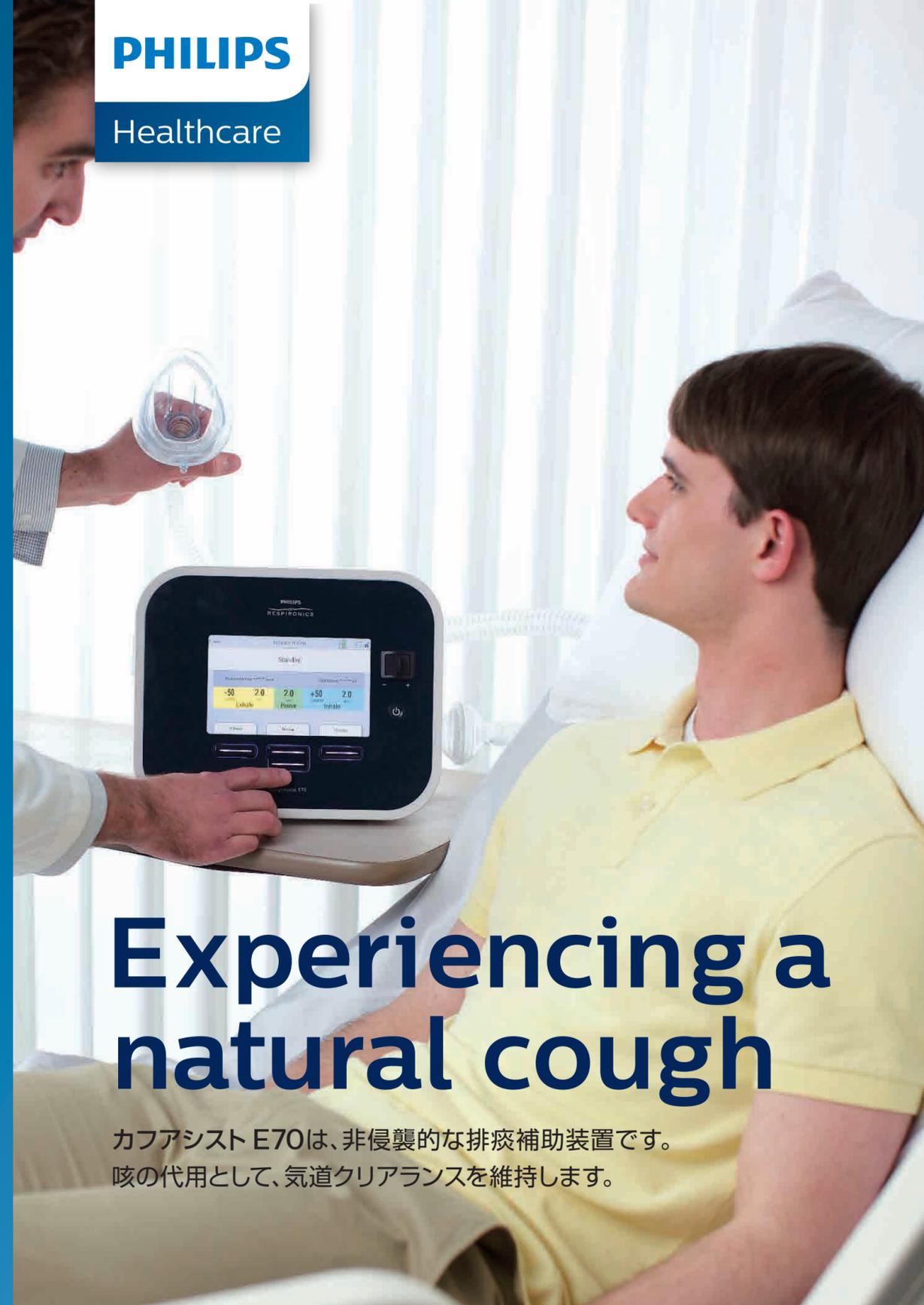

PHILIPS
Healthcare



持ち運びし易く頑丈な本体

- ・持ち運んだままで1日の治療*が可能な着脱式バッテリー
- ・携帯性を向上するハンドル



大きなカラーディスプレイと直感的なインターフェイス

- ・カスタマイズ可能なディスプレイ
- ・モニタリング機能
Peak Cough Flow
一回換気量

治療効果及び快適さの向上

- ・Cough-Trak機能
患者さんの吸気をトリガし、治療を開始することができます。
- ・オシレーション機能
気道に振動を与えることにより、排痰効果を高めます。
- ・マスクを保持しながら徒手的介助を行うためのフットペダル



販売名: カフアシスト E70 医療機器承認番号: 22500BZX00492000 管理医療機器 / 特定保守管理医療機器

製造販売業者 **株式会社 フィリップス・ジャパン**
〒108-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル
www.philips.co.jp/healthcare
睡眠・呼吸製品のお問い合わせは地域の営業所・出張所・駐在まで
※営業所・出張所・駐在の連絡先は以下のURLで公開しています
www.philips.co.jp/SRC-Office

ご購入に関するお問合せは

改良などの理由により予告なしに型番、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくはお近くの営業所までお問い合わせください。記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。

© 2019 Philips Japan, Ltd. PN 1113762/190520 R9-W



* 3~5回の連続したカフサイクル (+/-40cmH₂O) を4~6回繰り返すことを1回の治療とし、一日に4回治療を行った場合。

Experiencing a natural cough

カフアシスト E70は、非侵襲的な排痰補助装置です。咳の代用として、気道クリアランスを維持します。

カフアシスト E70は 排痰補助法の 新しいスタンダードです。

従来機種の基本性能に新しい機能や豊富な
オプションを追加、デザインを一新しました。

MI-E “Mechanical Insufflation-Exsufflation” は、フェイスマスクあるいは
気管挿管・気管切開チューブに接続して気道に陽圧を加えた後、急速に陰圧にシフト
することにより高い呼気流量を生じさせる排痰補助法です。
咳の代用として、非侵襲的に気道内分泌物の排出を助けます。

患者さんへより安全な排痰補助を行い、気道損傷や肺合併症などのリスクを軽減します。



**分泌物の咯出を補助し、気道クリアランスを
維持、向上します。**

新しく搭載したCough-Trak機能は、独自の吸気トリガ機能
で患者さんとの同調性を向上し、導入時のタイトレーションを
容易にします。

また調節可能なオシレーションにより分泌物の移動を促進させ、
治療の効果をより高めることも可能です。

安全かつ快適な治療のために。

直感的なインターフェイスと大きなカラーディスプレイは、設定
の微調整を簡単にし、安全性と快適さを提供します。

治療効果を確認できるPeak Cough Flow (PCF)や一回換気量
モニタリング機能や、治療中、不用意に設定が変更されてしま
うことを防止する設定ロック機能を新たに搭載しています。

オプション



フットペダル



フェイスマスク

乳幼児用、小児用、
成人用 (S,M,L)

マウスピース



着脱式
バッテリー

機器背面



ロールスタンド

製品仕様

プリセット		1, 2, 3	
Cough-Trak	OFF/ON		-
吸気圧		0~70cmH ₂ O	
吸気流量		低 / 中 / 高	
吸気時間	0~5 秒		-
呼気圧		0~70cmH ₂ O	
呼気時間	0~5 秒		-
休止時間	0~5 秒		-
	(Cough-TrakがOFFの場合のみ設定可能)		
オシレーション	OFF / 吸気 / 呼気 / 両方		
周波数	1~20Hz (オシレーションが設定されている場合のみ可能)		
振幅圧力	1~10cmH ₂ O (オシレーションが設定されている場合のみ可能)		
電氣的定格	AC電源 100~240VAC 50/60 Hz DC電源 12VDC		
寸法 (HxWxD) / 本体重量	23.1x 29.2 x 19cm / 4.3kg (着脱式バッテリーを含む)		

製品情報

	パーツナンバー	JANコード
カフアシスト E70	1098163	4582214224039
付属品: カフアシストE70本体、SDカード、フェイスマスク 成人用L、1.8mチューブ、 バクテリアフィルタ、キャリーケース、AC電源、花粉フィルタ、サーキットリテイナー		

アクセサリ / オプション

	パーツナンバー	JANコード
カフアシスト フェイスマスク 成人用 L	1055416	4582214254890
カフアシスト フェイスマスク 成人用 M	1114209	4582214268316
カフアシスト フェイスマスク 成人用 S	1114210	4582214268323
カフアシスト フェイスマスク 小児用	1114211	4582214268330
カフアシスト フェイスマスク 乳幼児用	1114212	4582214268347
カフアシスト マウスピース	1114213	4582214268354
カフアシスト アダプタ 成人 / 小児マスク 22x22	1055487	4582214254906
カフアシスト アダプタ 乳幼児マスク / 気管 22x22	1114214	4582214268361
カフアシスト 1.8m 回路セット フェイスマスク 成人用 M*	1114273	4582214268507
カフアシスト E70 花粉フィルタ	1114226	4582214268484
カフアシスト ディスポフィルター	1056037	4582214255057
Trilogy 着脱式 バッテリーバック	1043570	4582214258621
カフアシスト E70 フットペダル	1114222	4582214268446
カフアシスト E70 スタンド	1114218	4582214268408
カフアシスト E70 スタンド Trilogy 用ブラケット	1114219	4582214268415

* カフアシスト1.8m回路セット フェイスマスク成人用 M セット内容は、1.8m チューブ、カフアシスト フェイスマスク成人用M、カフアシスト ディスポフィルター、
カフアシストアダプタ 成人/小児マスク 22x22 となります。

院内から在宅へ
全てのステップ
のために



Titration

Discharge

Home therapy

Follow-up

MI-Eを用いた排痰介助・咳介助 概要と機器の使い方を動画でご覧いただけます。

患者向けツール一覧 <http://www.philips.com/patient-tools>

フィリップスヘルスケアウェブサイト「患者向けツール一覧」にアクセス後、フィルターの
サブカテゴリより「排痰介助・咳介助 (MI-E)」を選択、見たい動画の  アイコンを
クリックして再生します。



フィリップス 患者向けツール一覧 

タブレットやスマートフォンで
QRコードからもアクセス可能です。